

在宅ケアベッドの選び方

各部名称 状況に応じたベッドをお選びください。


サイドレール

寝ている人の転落、寝具の落下を防ぎます。
乗り降りの支えには介助バーをお使いください。

オーバーテーブル

サイドレールの上のせて使います。
キャスターのついた移動が自由なテーブルもあります。

ヘッドボード

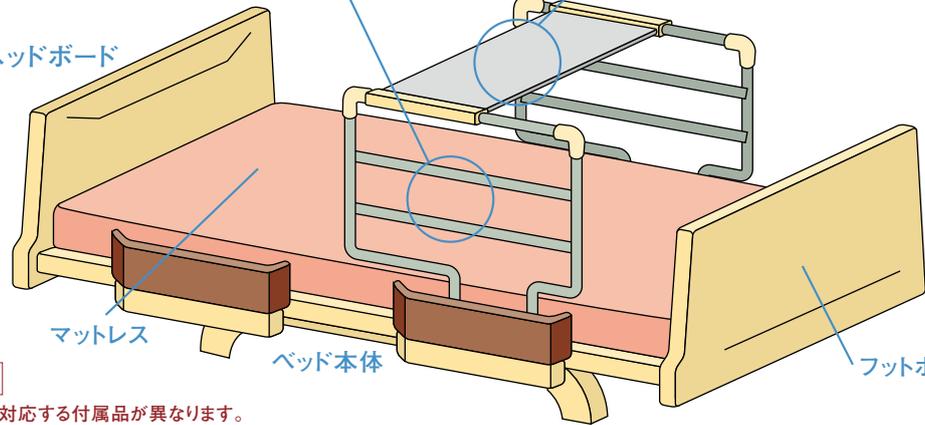

使用上のご注意

選ぶベッドによって、対応する付属品が異なります。

電動ベッドの主な機能


背上げ機能



背上げ

ベッドの背を上げて、お好きな角度に調節できます。
ご利用者さまが起き上がる時や、食事を取る時などに便利です。


高さ調節機能

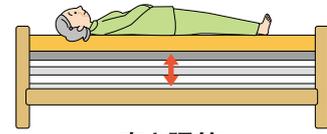

高さ調節

ベッドの高さを自動的に上下に調節できます。
ベッドから立ち上がる時に、立ち上がりやすい高さに調節すると便利です。また、介護する方の身長に合わせて高さ調節すると、介護する方の腰にかかる負担が軽減されます。

ひざ上げ機能

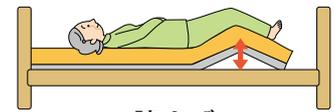

膝上げ

膝の部分上げて、お好きな角度に調節できます。
背上げの時に、膝の位置も上げると、ご利用者さまの身体の圧迫感を軽減し、身体がずれ落ちるのを防止します。

モーター別機能

2モーターベッド

背上げと膝上げが連動して同時に動きます。



背上げ機能

好みの角度に背を上げることができます。



背・膝連動機能

背上げに連動して膝を上げることができます。



高さ調節機能

ベッドの高さを自由に調節できます。



手元スイッチ

全ての操作をご利用者さま自身が行えます。

3モーターベッド

背上げと膝上げを別々のボタンで操作できます。



背上げ機能

好みの角度に背を上げることができます。



膝上げ機能

好みの角度で足を上げることができます。



高さ調節機能

ベッドの高さを自由に調節できます。



手元スイッチ

全ての操作をご利用者さま自身が行えます。

在宅ケアベッド

2モーターベッド



「背上げ」と「ベッドの高さ調節」が操作できるベッドです。



背上げ 高さ調節

- 楽匠プラス 2モーショシリーズ (→p12~p13)
- 楽匠Z 2モーショ (→p14)
- 楽匠FeeZ 2モーターシリーズ (→p15)
- レント 2モーターシリーズ (→p15)
- クオラONE 2モーター (→p16)
- 楽匠S 100幅 2モーター (→p16)
- Emi (エミ) 2モーター (→p20)
- 和夢 彩 2モーター (→p21)
- コア・ネオ 2モーター (→p21)

3モーターベッド




「背上げ」「ベッドの高さ調節」「膝上げ」が操作できるベッドです。



背上げ 高さ調節 膝上げ

- 楽匠プラス 3モーショシリーズ (→p12~p13)
- 楽匠Z 3モーショ (→p14)
- 楽匠FeeZ 3モーターシリーズ (→p15)
- レント 3モーターシリーズ (→p15)
- クオラONE 3モーター (→p16)
- 楽匠S 100幅 らくらく3モーショ (→p16)
- Emi (エミ) 3モーター (→p20)
- 和夢 彩 3モーター (→p21)
- コア・ネオ 3モーター (→p21)

ベッドのサイズの見方

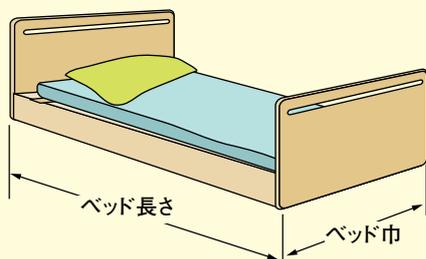

ベッドの巾

巾が広いベッドは、ご利用者さまが寝返りをうちやすく、巾が狭いベッドは、身体を動かせないご利用者さまの介護がしやすくなります。


ベッドの長さ

ご利用者さまの身長に合わせて選びましょう。レギュラーサイズの他に、短めのサイズや長めのサイズのベッドもあります。


ベッドのサイズ(ベッドの長さ)

ミニ

レギュラー

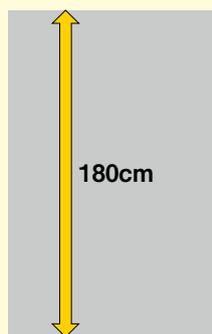

身長150cm未満の方

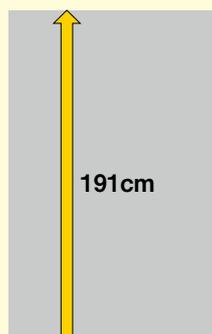

身長150cm以上の方

ベッドの設置について



在宅ケアベッドを設置するときには、ベッドの寸法に少し余裕を加えたスペースが必要です。壁にはぴったりとつけず7~8cm以上あけます。

ベッドのサイズ(ベッドの巾)


83cm幅

91cm幅


100cm幅



接近しやすく
介護がしやすい

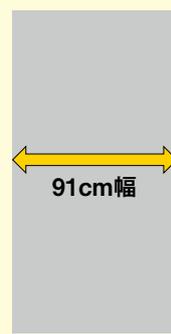



ゆったりとしたスペースと
介護のスペースを両立

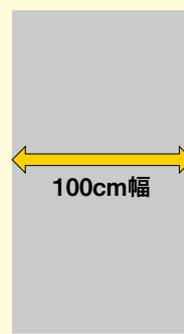

くつろぎとやすらぎを
両立する100cm幅

在宅ケアベッドの上手な使い方


特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
車いす
車いす付属品
スロープ
歩行器
歩行補助杖
徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置

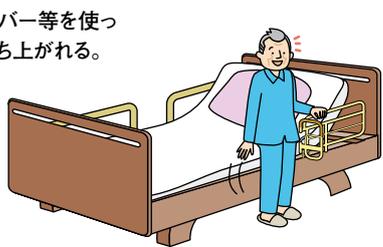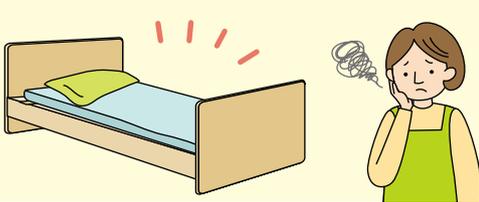	一般ベッド	在宅ケアベッド
寝返り	<p>介助バーなど、動作を補助する用具が取り付けられない。</p> 	<p>介助バーなど動作を補助する用具が取り付けられるので、スムーズ。</p> 
起き上がり	<p>自力で起き上がれない場合は介護をする方の手を借りることになり、負担大。</p> 	<p>電動の背上げ機能で、スムーズ。</p> 
起き上がり	<p>介護を受ける方が自分で上半身を起こさなければいけないので、負担が大きい。</p> 	<p>スイッチ操作だけで背上げ・膝上げができるので、楽に起き上がる。</p> 
端座位	<p>座りやすい高さに調節できない。</p> 	<p>高さ調節機能で適切な高さに調節でき、座りやすい姿勢を保つことができる。</p> 
立ち上がり	<p>高さ調節ができず、介助バーも取り付けられないので、支持物を確保できず、不安定。</p> <p>ズシ</p> 	<p>高さ調節機能と介助バー等を使って、安定した動作ができる。</p> 
立ち上がり	<p>立ち上がりやすい高さに調節できない。介助バーを取り付けられないので、支持物を確保しにくく不安定。</p> 	<p>高さ調節機能と介助バー等を使って安定した動作で立ち上がれる。</p> 
補助用具の利用	<p>介護に必要な補助用具がありません。(介助バー、ベッドサイドレールなどが取り付けられません)</p> 	<p>テーブル、ベッドサイドレールなど、組み合わせる補助用具(特殊寝台付属品)が目的に合わせて選べます。</p> 

電動介護ベッドの安全なご使用方法

ベッドの高さは適切な位置に!

- ベッドの高さが高いと、乗り降りの際に転倒する恐れがあります。
- ベッドの高さは常に低めの位置か、もしくは介護を受ける方に適切な(端座位姿勢のとれる)高さにしましょう。

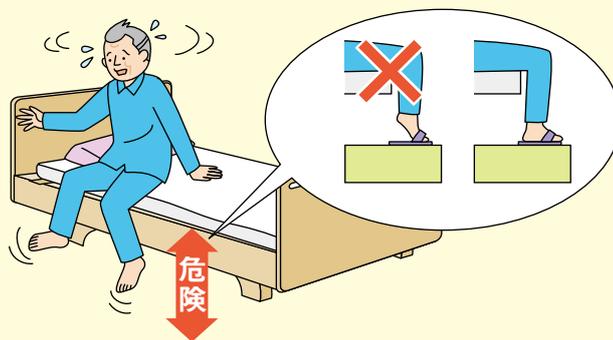

移乗の際は高さを合わせて!



- 介護を受ける方の移乗時に、ベッドの高さが合っていないと、無理をして思わぬケガをする恐れがあります。
- 介護を受ける方を移乗させる際は、ベッドの高さを調整し、移乗しやすい高さに設定しましょう。

動くものにつかまり歩行はやめましょう!




- ベッドサイドテーブル
- オーバーベッドテーブル

- 動くもの(キャスター付きのテーブルなど)を支えにして歩くと、滑って、転倒する恐れがあります。


サイドレールは高いものを!

- サイドレールの高さが低いと、サイドレールを乗り越えて転落する恐れがあります。
- サイドレールは、介護を受ける方が側臥位の寝姿勢をとったとき、身体の中心線(鼻とへそを結ぶ線)よりも上端が高いものを選びましょう。

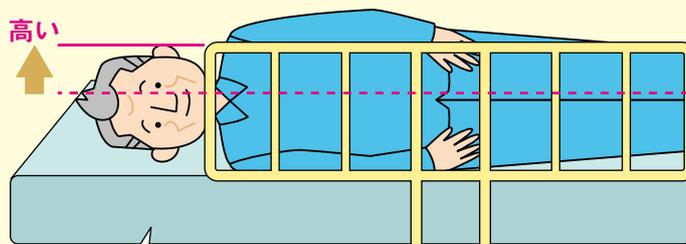


褥創予防マットレスは、厚みがありますので注意しましょう。

手元スイッチはここにかけ!

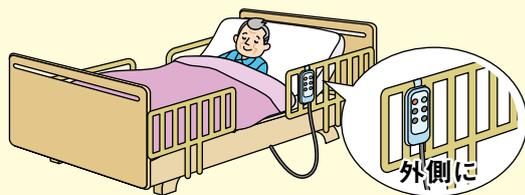

- 手元スイッチを上図の位置にかけないと、無意識にスイッチに触れて誤操作する恐れがあります。
- 手元スイッチは上図の位置にかけましょう。お使いになる方の理解度が低下している場合は、手元スイッチを手の届かないところにおきましょう。

ベッドの下などにもぐり込まないでください!

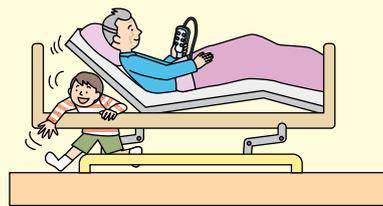


- ベッドの下にもぐり込んだり、ベッド内に身体の一部(頭や腕)などを入れないでください。ベッドの可動部分(ボトムなど)とフレームやベッドサイドレールとの間に頭・腕や足をはさんでケガをするおそれがあります。ベッドポジション操作時は、ベッドの下やうしろに障害物がないことを確認のうえ、操作してください。




より姿勢を安定させやすい 背サポート

腰部から胸部にかけてボトムの剛性を調整し、より身体にフィットしやすくなりました。背あげするときに背中をしっかり支持します。また、身体との接触面積が広がるので体圧をより分散できます。

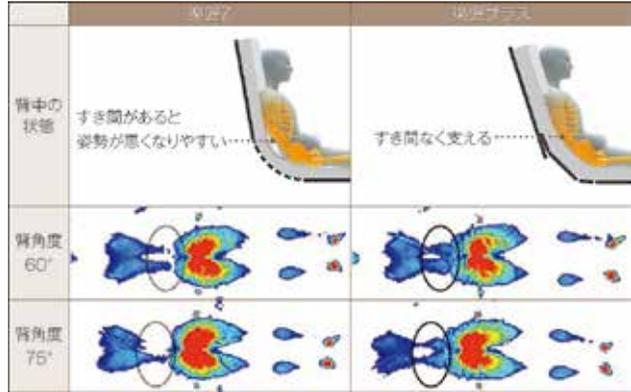


より骨盤を立てやすい 腰サポート

骨盤部にあたるボトムの剛性を高めて曲がり方を変更することで、骨盤をしっかり起こし、身体が動かしやすい背あげ姿勢に移行できます。骨盤をしっかり起こすことで身体が足側にずり落ちにくくなるため、床ずれリスクの軽減にもつながります。

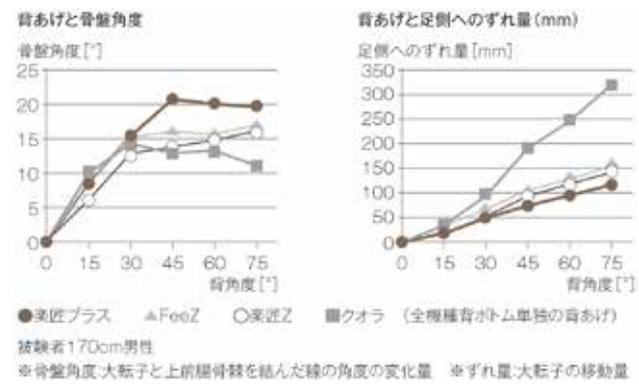


寸法表


Hタイプ 多機能ボード レギュラー/ミニ

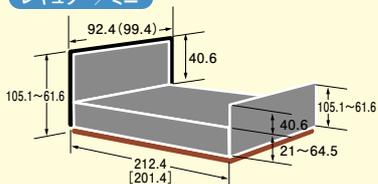

棚付ボード レギュラー/ミニ

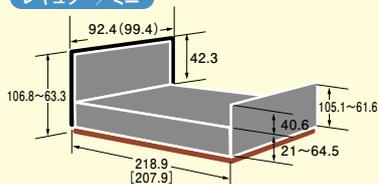

スリムボード レギュラー/ミニ

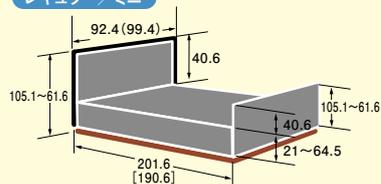

- 単位:cm
- ()は91cmの幅の寸法です。
- []はミニサイズの寸法です。

1台のベッドで、 レギュラー・ミニのサイズ変更が可能


楽匠プラスシリーズは、1台のベッドでレギュラーとミニとのサイズ変更が可能です。



身体の軸とベッドの軸を合わせやすい 新しいボトム分割(腰ボトム)




腰ボトムのサイズを人の身体に合わせ、大転子の位置にはガイドを設けました。これにより背あげするときの身体の動きとベッドの動きの軸を合わせやすくなります。また、運動など膝あげを併用する際に、骨盤をホールドするポケットを構成します。

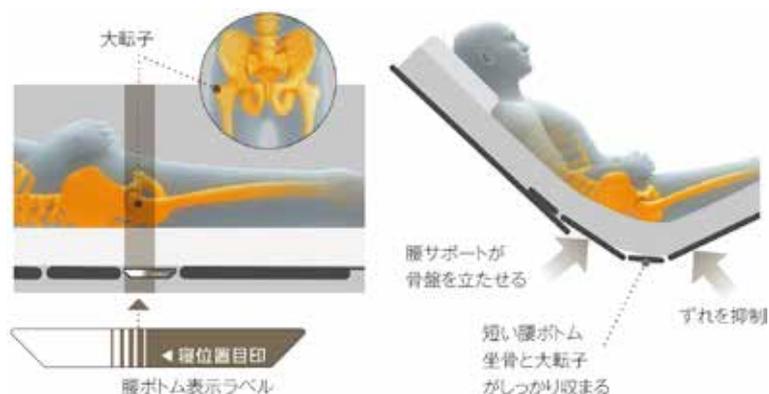

身長差をカバーする 膝サポート



膝部が多段階で曲がるので、身長差をカバーしてベッドの動きにフィットしやすくなりました。また、膝裏への当たりも良く馴染みやすくなっています。

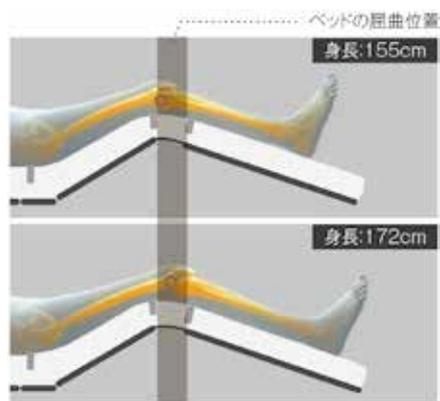

特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
車いす
車いす付属品
スロープ
歩行器
歩行補助杖
認知症老人
徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置

楽匠プラス 3モーション 多機能ボード

パラマウントベッド

伝い歩きに便利なグリップを備えた多機能ボードタイプ。
大きめの収納ポケットが便利です。



カラーモスグリーン

質量	質量
86.5 kg	84.5 kg
91cm	83cm

	商品番号	型式	TAISコード
レギュラー(91cm)ミニ(91cm)兼用	C-098A	KQ-A6311	00170-001315
レギュラー(83cm)ミニ(83cm)兼用	C-098B	KQ-A6111	
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
10,000	1,000	2,000	3,000

楽匠プラス 2モーション 多機能ボード

パラマウントベッド

ベーシックな2モーションタイプ。
自然をイメージできるモスグリーンの色が癒しをもたらします。



質量	質量
86.5 kg	84.5 kg
91cm	83cm

	商品番号	型式	TAISコード
レギュラー(91cm)ミニ(91cm)兼用	C-098C	KQ-A5311	00170-001287
レギュラー(83cm)ミニ(83cm)兼用	C-098D	KQ-A5111	
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
9,000	900	1,800	2,700

楽匠プラス 延長フレームセット

パラマウントベッド

レギュラーのベッドを足側に14cm延長できます。



商品名	商品番号	型式	TAISコード
延長フレーム91cm幅用	C-031P	KQ-PA2L	00170-001345
延長フレーム83cm幅用	C-031Q	KQ-PA0L	00170-001344
延長マットレス91cm幅用厚8~10cm用	C-031L	KE-L111	00170-001103
延長マットレス91cm幅用厚11~13cm用	C-031M	KE-L121	00170-001106
延長マットレス83cm幅用厚8~10cm用	C-031N	KE-L113	00170-001104
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
延長フレーム 1,500	150	300	450
延長マットレス 1,000	100	200	300

楽匠プラス 3モーション スリムボード

パラマウントベッド

パラマウントベッドの介護用ベッドでもっともコンパクト。
レギュラーサイズで201.6cm、ミニサイズで190.6cmです。



*ゆかからボトム上面までの高さです。



カラーモスグリーン

質量	質量
84.9 kg	83.1 kg
91cm	83cm

	商品番号	型式	TAISコード
レギュラー(91cm)ミニ(91cm)兼用	C-098E	KQ-A6314	00170-001442
レギュラー(83cm)ミニ(83cm)兼用	C-098F	KQ-A6114	
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
10,000	1,000	2,000	3,000

楽匠プラス 2モーション スリムボード

パラマウントベッド

ボードは耐薬品性があり凹凸の少ない形状のため、
衛生管理や感染対策に向いています。



*ゆかからボトム上面までの高さです。



質量	質量
84.9 kg	83.1 kg
91cm	83cm

	商品番号	型式	TAISコード
レギュラー(91cm)ミニ(91cm)兼用	C-098G	KQ-A5314	00170-001424
レギュラー(83cm)ミニ(83cm)兼用	C-098H	KQ-A5114	
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
9,000	900	1,800	2,700

楽匠プラス 3モーション・2モーション 棚付きボード

パラマウントベッド

質量
88.5
kg



※照明は付いておりません。

	商品番号	型式	TAISコード
3モーション レギュラー(91cm)ミニ(91cm)兼用	C-098J	KQ-A6318	00170-001489
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
11,000	1,100	2,200	3,300

質量
88.5
kg



カラーモスグリーン


	商品番号	型式	TAISコード
2モーション レギュラー(91cm)ミニ(91cm)兼用	C-098K	KQ-A5318	00170-001481
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
9,000	900	1,800	2,700

在宅ケアベッド

安定した姿勢で起きあがれ、床ずれリスクにも配慮した新しい背あげが出来るベッドです。



らくしょう Zシリーズ

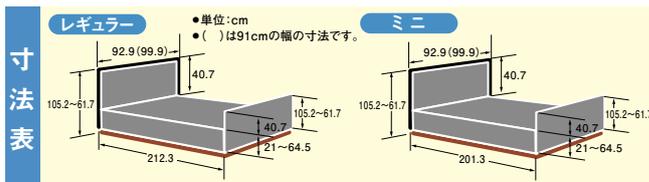

楽匠 Zシリーズ 3モーショーン セーフティラウンドボード

パラマウントベッド



ラクリアモーションに加え、らくらくモーション機構がついており、摩さつや圧迫感が少ない安定した姿勢で起きあがることができます。

質量	86.5 kg	質量	84.5 kg	質量	86 kg	質量	84 kg
	レギュラー(91cm幅)		レギュラー(83cm幅)		ミニ(91cm幅)		ミニ(83cm幅)

	商品番号	型式	TAISコード
レギュラー(91cm幅)	C-071A	KQ-7331	00170-000785
レギュラー(83cm幅)	C-071C	KQ-7311	00170-000785
ミニ(91cm幅)	C-071B	KQ-7321	00170-000785
ミニ(83cm幅)	C-071D	KQ-7301	00170-000785



月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
10,000	1,000	2,000	3,000

楽匠 Zシリーズ 2モーショーン セーフティラウンドボード

パラマウントベッド



ラクリアモーションに加え、背の角度とベッドの高さが個別に操作可能です。

質量	85.5 kg	質量	83.5 kg	質量	85 kg	質量	83 kg
	レギュラー(91cm幅)		レギュラー(83cm幅)		ミニ(91cm幅)		ミニ(83cm幅)

	商品番号	型式	TAISコード
レギュラー(91cm幅)	C-081A	KQ-7231	00170-000777
レギュラー(83cm幅)	C-081C	KQ-7211	00170-000777
ミニ(91cm幅)	C-081B	KQ-7221	00170-000777
ミニ(83cm幅)	C-081D	KQ-7201	00170-000777



月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
8,000	800	1,600	2,400

延長フレームセット

パラマウントベッド



レギュラーのベッドを足側に14cm延長できます。

	商品番号	型式	TAISコード
延長フレーム(91cm幅用)	C-031E	KQ-P72L	00170-000793
延長フレーム(83cm幅用)	C-031F	KQ-P70L	00170-000792
延長マットレス(91cm幅用/厚み8cm)	C-031B	KE-551L	00170-000563
延長マットレス(91cm幅用/厚み10cm)	C-031G	KE-521L-LA	00170-000564
延長マットレス(83cm幅用/厚み8cm)	C-031D	KE-553L	00170-000565
延長マットレス(83cm幅用/厚み10cm)	C-031H	KE-523L-LA	00170-000566

数量限定商品の為、お問い合わせください。

数量限定商品の為、お問い合わせください。

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
延長フレーム 1,500	150	300	450
延長マットレス 500	50	100	150

特殊寝台 特殊寝台付属品 床ずれ防止用具 体位変換器 手すり 車いす 車いす付属品 スロープ 歩行器 歩行補助杖 徘徊感知機器 移動用リフト 自動排泄処理装置

在宅ケアベッド

独自の快適な背上げ機構に、超低床化による安全性と安心感をプラスしたパラマウントベッドの“超”低床ベッドです。



質量 96.5 kg 3モーター
質量 95.0 kg 2モーター

数量限定商品の為、お問い合わせください。



質量 92.0 kg 3モーター
質量 90.5 kg 2モーター


数量限定商品の為、お問い合わせください。



※3モーターのみ

※3モーターのみ

寸法表

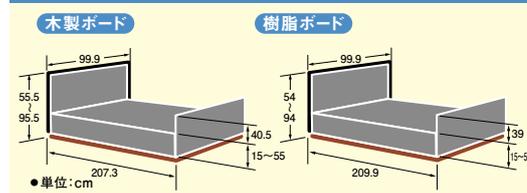

楽匠 FeeZシリーズ 3モーター 木製ボード レギュラー(91cm幅) パラマウントベッド

商品番号	C-090A	型式	KQ-7833	TAISコード	00170-000893
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担	
10,000		1,000	2,000	3,000	

楽匠 FeeZシリーズ 2モーター 木製ボード レギュラー(91cm幅) パラマウントベッド

商品番号	C-091A	型式	KQ-7733	TAISコード	00170-000892
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担	
8,000		800	1,600	2,400	

楽匠 FeeZシリーズ 3モーター 樹脂木目ボード レギュラー(91cm幅) パラマウントベッド

商品番号	C-090B	型式	KQ-7831	TAISコード	00170-000919
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担	
10,000		1,000	2,000	3,000	

楽匠 FeeZシリーズ 2モーター 樹脂木目ボード レギュラー(91cm幅) パラマウントベッド

商品番号	C-091B	型式	KQ-7731	TAISコード	00170-000918
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担	
8,000		800	1,600	2,400	

レントシリーズ

省スペース設計とご家庭での使いやすさを配慮した低床電動ベッド。

- 独自機構らくらくモーションによる起きあがりに加えて、背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能。
- 低床22cmから62cmまでの垂直昇降方式の高さ調節機能。
- 使いやすい表示パネル付き手元スイッチ
- 薄型・軽量の樹脂製ボードによる省スペース設計



質量 80.5 kg 3モーター
質量 79.5 kg 2モーター


レント3モーター レギュラー(91cm幅) パラマウントベッド

商品番号	C-097A	型式	KQ-68333	TAISコード	00170-001020
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担	
9,000		900	1,800	2,700	

レント2モーター レギュラー(91cm幅) パラマウントベッド

商品番号	C-096A	型式	KQ-68233	TAISコード	00170-001023
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担	
7,000		700	1,400	2,100	

寸法表

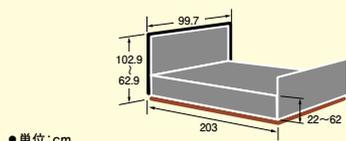

●単位:cm

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器

歩行補助杖

徘徊感知機器

移動用リフト

自動排泄処理装置

特殊寝台 特殊寝台付属品
 床ずれ防止用具
 体位変換器
 手すり
 車いす
 車いす付属品
 スロープ
 歩行器
 歩行補助杖
 認知症老人 徘徊感知機器
 移動用リフト
 自動排泄処理装置


PARAMOUNT BED パラマウントベッド

クオラ ONE

介護ベッドとしての基本機能は搭載されたシンプルモデル。




質量	質量
88.5 kg	87.5 kg
3モーター	2モーター

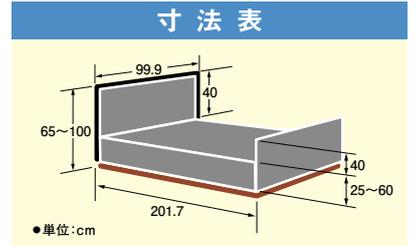

ここがパラマウントベッド!

ストレッチ背あげ

単に背ボトムを起すのではなく、やや伸びあがるように起すことで背ボトムと身体との回転軸が近くなり、背あげによる圧迫感や姿勢のずれを軽減します。

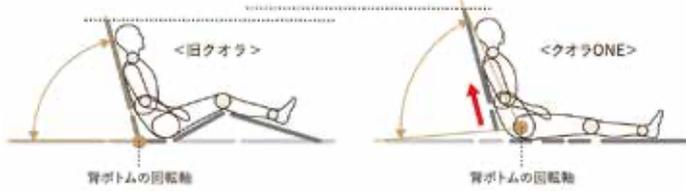

ソフトストップ制御


急始動・急停止する感じが振動を抑えて、ベッドの動きが穏やかでやさしく感じられるように、背・膝・高さの上げ下げなどの動き始めと止まる前の速さを自動制御しています。

定速制御

ベッドの高さを調節するときに、利用者さまに不自然な感じを与えないやさしい動きにするために、利用者さまの体重にかかわらず、動作中の速さが変わらないように制御しています。

一旦停止機能

ベッドの高さを下げるときに足や周辺の物品を挟まないように、ボトムの高さが32cmになるとブザーを鳴らして一旦停止します。ボタンを押しながら最低位(25cm)まで通常よりもゆっくりと下がります。

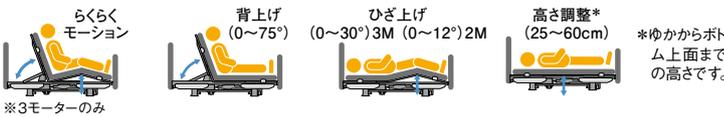

クオラ ONE 3M スクエアボード パラマウントベッド

商品番号	型式	TAISコード	
C-100B	KQ-B6327	00170-001523	レギュラー 91cm幅
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
8,000	800	1,600	2,400


クオラ ONE 2M スクエアボード パラマウントベッド

商品番号	型式	TAISコード	
C-100A	KQ-B6227	00170-001526	レギュラー 91cm幅
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,000	600	1,200	1,800



楽匠Sシリーズは、介護に必要な3つの「S(安全・解決・支援)」をテーマにしたベッドです。

上質なゆとりをお届けする100cm幅。

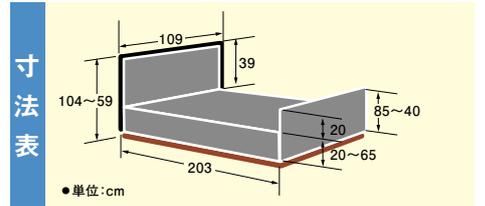

楽匠Sシリーズらくらくモーション 木製ボード レギュラー(100cm幅) パラマウントベッド

商品番号	C-006B	型式	KQ-9652	TAISコード	00170-000679	質量	99.0 kg
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担				
14,000	1,400	2,800	4,200				

楽匠Sシリーズ 2モーター 木製ボード レギュラー(100cm幅) パラマウントベッド

商品番号	C-006A	型式	KQ-9252	TAISコード	00170-000678	質量	97.5 kg
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担				
12,000	1,200	2,400	3,600				

在宅ケアベッド 付属品 パラマウントベッド専用

ベッドサイドレール(1本)ハイタイプ パラマウントベッド

商品番号	型式	届出コード
C-201B	KS-171Q	00170-Z00197(1本)

TAISコード:00170-000529(2本)



長さ96.4cm 高さ56.3cm 色:アイボリー

月極レンタル料金

300

1割負担	2割負担	3割負担
30	60	90

※15cm以上厚みのあるマットレスを使用する場合にお使いください。

オプション製品はJIS規格にもとづいています。
オプション製品は目的にあわせてお選びください。



※ベッドの同一側面ではKS-191Qを単独で、もしくはKS-098A、KS-099A、KS-030A、KS-151Qと組み合わせて使用してください。
※ベッドの同一側面ではKS-191Qを2本並べて使用しないでください。
※ベッドの同一側面ではKS-030Aを単独または2本並べて、もしくはKS-098A、KS-099A、KS-191Q、KS-151Qと組み合わせて使用してください。
※厚みのあるマットレスの時は、KS-171Qをご使用ください。

スイングアーム介助バー パラマウントベッド

商品番号	型式	TAISコード
C-201W	KS-099A	00170-001205



長さ112cm 高さ52.1cm

月極レンタル料金

2,000

1割負担	2割負担	3割負担
200	400	600

スイングアーム介助バー パラマウントベッド

商品番号	型式	TAISコード
C-201T	KS-098A	00170-000898



長さ112.1cm 高さ52.6cm

月極レンタル料金

2,000

1割負担	2割負担	3割負担
200	400	600

数量限定商品の為、お問い合わせください。

サイドグリップ パラマウントベッド

商品番号	型式	TAISコード
C-201U	KS-030A	00170-000897



長さ82.2cm 高さ52.3cm

月極レンタル料金

1,000

1割負担	2割負担	3割負担
100	200	300

ベッドサイドレール(1本) パラマウントベッド

商品番号	型式	届出コード
C-201A	KS-161Q	00170-Z00019(1本)

TAISコード:00170-000527(2本)



長さ96.4cm 高さ50.3cm 色:アイボリー

月極レンタル料金

300

1割負担	2割負担	3割負担
30	60	90

ベッドサイドレール(1本) パラマウントベッド

商品番号	型式	TAISコード
C-201H	KS-191Q	00170-000752



長さ82.7cm 高さ50.3cm 色:アイボリー

月極レンタル料金

300

1割負担	2割負担	3割負担
30	60	90

ベッドサイドレール(1本)介助バー組合せ用 パラマウントベッド

商品番号	型式	TAISコード
C-201D	KS-151Q	00170-000537



長さ59cm 高さ50.3cm 色:アイボリー

月極レンタル料金

300

1割負担	2割負担	3割負担
30	60	90

レント専用キャスター
パラマウントベッド

商品番号	型式	TAISコード
D-338C	KQ-P68C	00170-001031



※ベッドの高さが5cm低くなります。

月極レンタル料金		
1,000		
1割負担	2割負担	3割負担
100	200	300

Z・プラスシリーズ専用キャスター
パラマウントベッド

商品番号	型式	TAISコード
C-201M	KQ-P70C	00170-000794



※ベッドの高さが3cm高くなります。

月極レンタル料金		
1,000		
1割負担	2割負担	3割負担
100	200	300

クオラONE用キャスター(4コセット)
パラマウントベッド

商品番号	型式	TAISコード
D-338D	KQ-PB3C	00170-001516



※ベッドの高さは変わりません。

月極レンタル料金		
800		
1割負担	2割負担	3割負担
80	160	240

Sシリーズ・FeeZ専用キャスター
パラマウントベッド

商品番号	型式	TAISコード
C-201E	KQ-P90C	00170-000560



※ベッドの高さは変わりません。

月極レンタル料金		
1,000		
1割負担	2割負担	3割負担
100	200	300

**Sシリーズ・FeeZ・レント専用キャスター付
ハイトスペーサー**
パラマウントベッド

商品番号	型式	TAISコード
C-201G	KQ-P90CH	00170-000608



※ベッドの高さが6.5cm高くなります。(S・FeeZ)
レントは高さは変わりません。

月極レンタル料金		
1,000		
1割負担	2割負担	3割負担
100	200	300

Sシリーズ・FeeZ専用ハイトスペーサー
パラマウントベッド

商品番号	型式	TAISコード
C-201F	KQ-P90H	00170-000561



※ベッドの高さが6.5cm高くなります。

月極レンタル料金		
0		
1割負担	2割負担	3割負担
0	0	0

基本セット アクセサポート基本セット KQ-P70G
パラマウントベッド



※ベッドは基本セットに含まれません。

商品番号	型式	TAISコード
D-331D	KQ-P70G	00170-000795

月極レンタル料金		
4,800		
1割負担	2割負担	3割負担
480	960	1,440

数量限定商品の為、お問い合わせください。

垂直ポール アクセサポート垂直ポール KQ-P70P
パラマウントベッド



商品番号	型式	届出コード
D-331E	KQ-P70P	00170-Z00123

月極レンタル料金		
500		
1割負担	2割負担	3割負担
50	100	150

数量限定商品の為、お問い合わせください。

歩行用手すり アクセサポート歩行用手すり KQ-P70T
パラマウントベッド



商品番号	型式	届出コード
D-331F	KQ-P70T	00170-Z00132

月極レンタル料金		
2,000		
1割負担	2割負担	3割負担
200	400	600

数量限定商品の為、お問い合わせください。


ベッド適合表	型番	サイズ	ボード	テーブル KF-1920 KF-1960	床走行リフト	延長フレーム	延長マットレス	キャスター
楽匠プラス H型	KQ-A6311	91R ミニ兼用 3M	樹脂	●	●	91 幅 KQ-PA2L 83 幅 KQ-PA0L	91 幅延長マットレス KE-551L (8cm) KE-L111 (8~10cm) KE-L121 (11~13cm) 83 幅延長マットレス KE-553L (8cm) KE-L113 (8~10cm)	KQ-P70C (ベッドの高さが 3cm高くなります)
	KQ-A6111	83R ミニ兼用 3M	樹脂					
	KQ-A5311	91R ミニ兼用 2M	樹脂					
	KQ-A5111	83R ミニ兼用 2M	樹脂					
	KQ-A6314	91R ミニ兼用 3M	スリム					
	KQ-A6114	83R ミニ兼用 3M	スリム					
	KQ-A5314	91R ミニ兼用 2M	スリム					
	KQ-A5114	83R ミニ兼用 2M	スリム					
	KQ-A6318	91R ミニ兼用 3M	棚付					
	KQ-A5318	91R ミニ兼用 2M	棚付					
楽匠Z	KQ-7331	91R3M	樹脂	●	●	91 幅 KQ-P72L 83 幅 KQ-P70L	91 幅延長マットレス KE-551L (8cm) KE-521L・LA (10cm) KE-L111 (8~10cm) KE-L121 (11~13cm) 83 幅延長マットレス KE-553L (8cm) KE-523L・LA (10cm) KE-L113 (8~10cm)	KQ-P70C (ベッドの高さが 3cm高くなります)
	KQ-7321	91 ミニ 3M	樹脂					
	KQ-7311	83R3M	樹脂					
	KQ-7301	83 ミニ 3M	樹脂					
	KQ-7231	91R2M	樹脂					
	KQ-7221	91 ミニ 2M	樹脂					
	KQ-7211	83R2M	樹脂					
	KQ-7201	83 ミニ 2M	樹脂					
FeeZ	KQ-7833	91R3M	木製	ハイトスペーサー または ハイトキャスター KQ-P90CHが 必要です	ハイトスペーサー または ハイトキャスター KQ-P90CHが 必要です	91 幅 KQ-P78L	91 幅延長マットレス KE-551L (8cm) KE-521L・LA (10cm) KE-L111 (8~10cm) KE-L121 (11~13cm)	KQ-P90C (ベッドの高さは 変わりません) KQ-P90CH (ベッドの高さが 6.5cm高くなります)
	KQ-7733	91R2M	木製					
	KQ-7831	91R3M	樹脂					
	KQ-7731	91R2M	樹脂					
レント	KQ-68333	91R3M	樹脂	●	●	91 幅 KQ-P78L	91 幅延長マットレス KE-551L (8cm) KE-L111 (8~10cm) KE-L121 (11~13cm)	KQ-P90CH (ベッドの高さは 変わりません) KQ-P68C (ベッドの高さが 5cm低くなります)
	KQ-68233	91R2M	樹脂					
クオラONE	KQ-B6327	91R3M	スクエア	●	●			KQ-PB3C (ベッドの高さは 変わりません)
	KQ-B6227	91R2M	スクエア					
楽匠S100 幅	KQ-9652	100R3M	木製	ハイトスペーサー またはハイト キャスター KQ-P90CHが 必要です	ハイトスペーサー またはハイト キャスター KQ-P90CHが 必要です	100 幅 KQ-P94L	100. 幅延長マットレス KE-557L (8cm)	KQ-P90C (ベッドの高さは 変わりません) KQ-P90CH (ベッドの高さが 6.5cm高くなります)
	KQ-9252	100R2M	木製					

Emi (エミ)

かつてない多彩なポジショニングが可能
ADLの改善・QOLの向上に!

介護を取り巻く環境にもっと笑顔を

Emi 

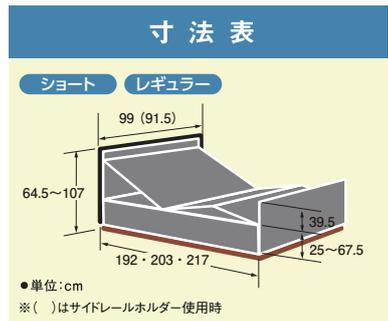

Emi 紹介動画



Emi / トールタイプ 樹脂ボード [木目ダーク]

電動ヘッドレスト機能

ADL ポジション | 誤嚥リスクの低減に

「頸部前屈位」という顎を引いた前向き目線の姿勢になり、誤嚥リスクを低減します。ベッド上での食事や投薬時に、また口腔ケア時のポジショニングにご使用ください。

電動ヘッドレスト未使用時



電動ヘッドレスト使用時



QOL ポジション | 安楽姿勢に

上体が起きるので、ご家族と目線が合いやすくコミュニケーションをとる場合に最適。また、ベッド上でTVを見たり、本を読んだりする場合にも活用でき、快適にお過ごしいただけます。

0~50°



業界最高の脚上げ

在宅医療への活用に / 床ずれリスク軽減に

脚先は下がらず、水平になるためむくみ解消効果がより期待できます。

2モーター+
ヘッドレスト
脚上げ 30°

3モーター+
ヘッドレスト
脚上げ 45°

業界初!
ここまで
上がるのは
Emiだけ

足先が水平に



使いやすい手元スイッチ

液晶手元スイッチは、頭・背・足の角度や高さが数値で一目でわかります。



[3モーター+
ヘッドレスト]

[2モーター+
ヘッドレスト]

液晶表示



ベッド動作時に音声案内が出ます。

Emi(エミ) 3モーター+ヘッドレスト ショート・レギュラー (90cm幅)

シーホネンス

商品番号	C-013B	型式	WR3-90H16	TAIS コード	00167-000316	質量	92.8 kg
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担				
10,000	1,000	2,000	3,000				

Emi(エミ) 2モーター+ヘッドレスト ショート・レギュラー (90cm幅)

シーホネンス

商品番号	C-013A	型式	WR2-90H16	TAIS コード	00167-000332	質量	92.1 kg
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担				
8,000	800	1,600	2,400				



JIS T 9254 : 2009



ML0509002

SEAHONENCE



- 本体/スチール製、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ
- ヘッド・フットボード/樹脂製(木目シート貼り)



和夢シリーズ 彩 3モーター ショート・レギュラー(ボトム幅90cm) シーホネンス

商品番号	C-010A	型式	NX-1W	TAIS コード	00167-000195	質量	88.0 kg
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担			
10,000		1,000	2,000	3,000			

和夢シリーズ 彩 2モーター ショート・レギュラー(ボトム幅90cm) シーホネンス

商品番号	C-009A	型式	NX-2W	TAIS コード	00167-000197	質量	87.5 kg
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担			
8,000		800	1,600	2,400			




CORE Neo

コア・ネオ

SEAHONENCE

生まれ変わった『CORE Neo』は、「軽量」「簡単」「快適」をコンセプトとし、さらに使いやすくなりました。

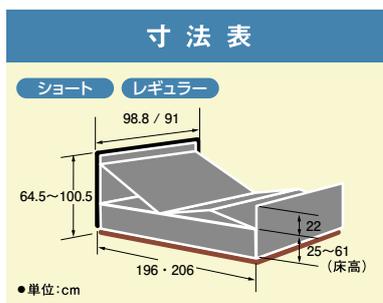

- 本体/スチール製
- ヘッド・フットボード/樹脂製

CORE Neo 3モーター ショート・レギュラー(ボトム幅90cm) シーホネンス

商品番号	C-095A	型式	NS-830	TAIS コード	00167-000263	質量	72.0 kg
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担			
7,000		700	1,400	2,100			

CORE Neo 2モーター ショート・レギュラー(ボトム幅90cm) シーホネンス


商品番号	C-094A	型式	NS-820	TAIS コード	00167-000262	質量	71.0 kg
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担			
6,000		600	1,200	1,800			



和夢シリーズ 彩/CORE Neo/emi オプション

中央差し可能 ベッドサイドレール シーホネンス

商品番号	型式	届出コード
C-221B	K-170SS(1本)	00167-Z00095

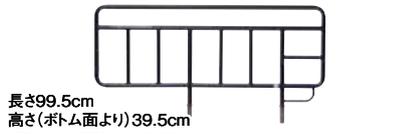

月極レンタル料金		
200		
1割負担	2割負担	3割負担
20	40	60

中央差し可能 ベッドサイドレール シーホネンス


商品番号	型式	届出コード
C-221I	K-170S(1本)	00167-Z00106



月極レンタル料金		
200		
1割負担	2割負担	3割負担
20	40	60

中央差し可能 ベッドサイドレール シーホネンス


商品番号	型式	届出コード
C-221C	K-173(1本)	00167-Z00091

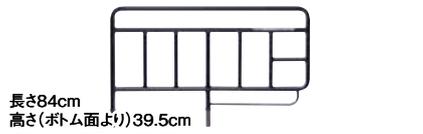

月極レンタル料金		
200		
1割負担	2割負担	3割負担
20	40	60

中央差し可能 ベッドサイドレール シーホネンス


商品番号	型式	届出コード
C-221J	K-173S(1本)	00167-Z00089

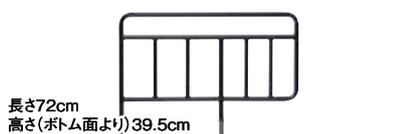

月極レンタル料金		
200		
1割負担	2割負担	3割負担
20	40	60

ベッドサイドレール シーホネンス


商品番号	型式	TAISコード
C-221M	K-195RX	00167-000233

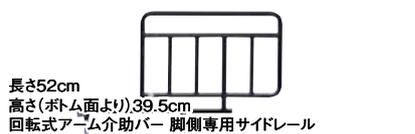

月極レンタル料金		
300		
1割負担	2割負担	3割負担
30	60	90

ベッドサイドレール シーホネンス

商品番号	型式	TAISコード
C-221N	K-195SX	00167-000232

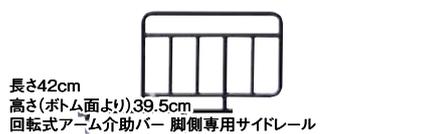

月極レンタル料金		
300		
1割負担	2割負担	3割負担
30	60	90

回転式アーム介助バー シーホネンス

商品番号	型式	TAISコード
C-221H	K-47R	00167-000226



月極レンタル料金		
2,000		
1割負担	2割負担	3割負担
200	400	600

回転式アーム介助バー シーホネンス


商品番号	型式	TAISコード
C-221Q	K-40RX	00167-000204



月極レンタル料金		
2,000		
1割負担	2割負担	3割負担
200	400	600

サポートグリップ シーホネンス

商品番号	型式	TAISコード
C-221P	K-95	00167-000281

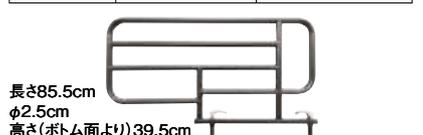

月極レンタル料金		
1,000		
1割負担	2割負担	3割負担
100	200	300

Emi専用キャスター(4個セット) シーホネンス

商品番号	型式	TAISコード
D-338C	K-129WR	00167-000209



月極レンタル料金		
1,000		
1割負担	2割負担	3割負担
100	200	300

彩/CORE Neo専用キャスター(4個セット) シーホネンス

商品番号	型式	TAISコード
C-221F	K-129	00167-000209



月極レンタル料金		
1,000		
1割負担	2割負担	3割負担
100	200	300



※サイドレールの組合せや差し込み方向など詳細は取り扱い説明書をご確認ください。

さい コア・ネオ エミ
彩/CORE Neo/emi ベッドサイドレール組合せ

※サイドレールの組合せや差し込み方向など詳細は取り扱い説明書をご確認ください。

JIS 適合組み合わせ

Emi / 彩 / コアネオ・レギュラーサイズ

あたま側

あし側

Emi / 彩 / コアネオ・ショートサイズ

あたま側

あし側

- 特殊寝台付属品
- 特殊寝台
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- 車いす
- 車いす付属品
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 徘徊感知機器
- 認知症老人
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置

特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
車いす
車いす付属品
スロープ
歩行器
歩行補助杖
認知症老人
徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置

ベッドサイドテーブル パラマウントベッド


商品番号	D-341D	型式	KF-1960	TAIS コード	00170-000718
------	---------------	----	----------------	-------------	--------------



月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
2,000	200	400	600

ベッドサイドテーブル パラマウントベッド

商品番号	D-341C	型式	KF-1920	TAIS コード	00170-000716
------	---------------	----	----------------	-------------	--------------

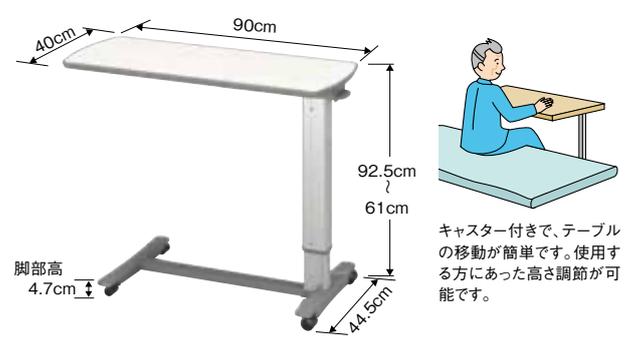

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
2,000	200	400	600

リハビリテーブル パラマウントベッド


商品番号	D-358B	型式	KF-840	TAIS コード	00170-000489
------	---------------	----	---------------	-------------	--------------



月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
3,000	300	600	900

オーバーベッドテーブル パラマウントベッド

商品番号	KF-833LA→D-345A KF-833SA→D-345B	型式	KF-833LA (91幅用) KF-833SA (83幅用)
TAIS コード	KF-833LA→00170-000315 KF-833SA→00170-000316		

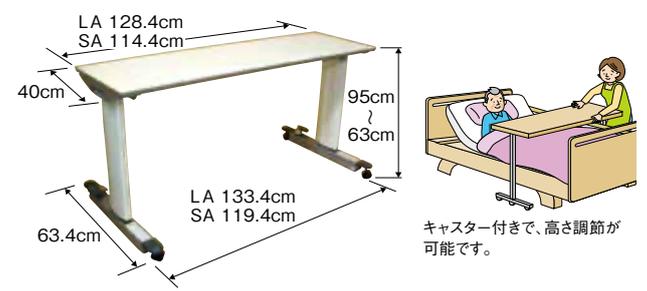


月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
3,000	300	600	900

アジャストテーブル パラマウントベッド

商品番号	D-355A	型式	KQ-090	TAIS コード	00170-000188
------	---------------	----	---------------	-------------	--------------

ベッドサイドレールに載せて使用するテーブルです。
幅の調節が出来、91幅と83幅両方のベッドに対応します。
◆両端上部は小物が置けるペントレー形状になってます。

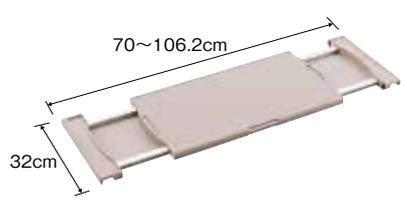

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
500	50	100	150

オーバーテーブル パラマウントベッド

商品番号	KQ-060L →D-351A KQ-060M →D-351B KQ-060W →D-351C	型式	KQ-060L (91幅用) KQ-060M (83幅用) KQ-060W (100幅用)
TAIS コード	KQ-060L →00170-000374 KQ-060M →00170-000373 KQ-060W →00170-000375		



ベッドサイドレールに取付けるタイプのテーブルです。
ベッド上でギャッジアップして食事をとる方用のベッド用テーブルです。

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
500	50	100	150

ベッドサイドテーブル キャスター4輪ロック シーホネンス



笑テーブル シーホネンス

「笑テーブル」で頸部周りの筋緊張を緩めることができます。



ヘッドレスト | 笑テーブル
未使用 | 未使用 使用 | 使用

適切な角度と高さに腕を調節し、肘が固定できるので、頸部周りの筋緊張が緩み、誤嚥しにくい姿勢をサポート。
従来クッションでサポートしていた姿勢を、安定的に再現することができます。ベッド上での半座位だけでなく、端座位での食事や読書、車いすでの食事場面などにも活用可能です。

※PT-7000FとセットでのTAISコードになります。

商品番号	D-342A	型式	PT-7000F[D]	TAISコード	00167-000351
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担	
	2,000	200	400	600	

商品番号	型式	TAISコード	
D-343A	PT-7000F[D]+PW-1000	00167-000388	
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
3,000	300	600	900

フレックスボード

ラックヘルスケア



寝た状態のままベッド内の移動だけでなくベッド↔ストレッチャーなどへの移乗が可能です。
アコーディオン形状が移乗時の姿勢にピッタリフィット。
※移乗間の距離は20cm以内。

商品番号	型式	TAISコード	耐荷重(kg)
D-362A	フレックスボード	00245-000151	160
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
3,500	350	700	1,050

マスターベルトS

ラックヘルスケア



立ち上げさせたり、座らせたりする際や、歩行時のサポートとして安全に介助を行えます。



バックルはサイドロック採用で装着はいたって簡単です



利用イメージ

商品番号	TAISコード	サイズ(cm)	
D-361B	00245-000144	62~100(ウエスト目安)	
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
1,500	150	300	450

イージーグライドM

パラマウントベッド

高い強度と優れた柔軟性により座ったままでの乗り降りが可能です。



商品番号	型式	TAISコード	耐荷重(kg)
D-361A	KZ-A29036	00170-000570	135
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
1,000	100	200	300

マットレス一覧表 (参考資料)

かため	品名	厚さ	サイズ表		
			幅	レギュラー	ショート
かため	 プレグラー	8.0 cm	100 91 83	○ ○ ○	 ○ ○
	 シングルウェーブ	6.0 cm	100 91 83	○ 	
	 ストレッチスリム	7.0 cm	100 91 83	○ ○ ○	 ○ ○
	 エバーリーフ7 ハード面 リバーシブル	7.0 cm	100 91 83	○ ○ 	
	 エバーリーフ7 ソフト面 リバーシブル	7.0 cm	100 91 83	○ ○ 	
	 エバーフィットC3 ハード面 リバーシブル (防水・通気)	10.0 cm	100 91 83	○ ○ ○	 ○ ○
	 ソフィア ハード面 リバーシブル	10.0 cm	100 91 83	○ ○ ○	 ○ ○
	 テルサ 防水 ハード面 リバーシブル	12.0 cm	100 91 83	○ ○ ○	
	 フィットテックス	8.0 cm	100 91 83	○ 	
	 ストレッチフィット	9.0 cm	100 91 83	○ ○ ○	 ○ ○
	 エバーフィットC3 ソフト面 リバーシブル (防水・通気)	10.0 cm	100 91 83	○ ○ ○	 ○ ○
	 ソフィア ソフト面 リバーシブル	10.0 cm	100 91 83	○ ○ ○	 ○ ○
柔らかめ	 テルサ 防水 ソフト面 リバーシブル	12.0 cm	100 91 83	○ ○ ○	

マットレスの選び方

お使いになる方の状態や目的に合わせてお選びください。



ベッド上とベッドまわりでどのような生活をしますか？

- 就寝時に使用 就寝と日中の休息に使用
 大半をベッドで過ごす

マットレスを選ぶにあたって、優先したいことは何ですか？

- 立ち上がり 端座位 床ずれ予防

マットレスを選びます。迷ったときは、ケアマネージャーに相談。

マットレスの種類

一般用マットレス



在宅ケアベッドに適した構造のマットレスです。

マットレスを選ぶ際のポイント

動作のしやすさ

動作をしやすいのは、人のからだの柔らかさに近いマットレスや、やや硬めのマットレスです。

マットレスの製品特性

立ち上がりのしやすさや端座位を取ったときの安定性、体圧分散性なども考慮する必要があります。また、お手入れの面から、重さや拭き取りやすさがポイントとなります。

寝具の好み

普段から使い慣れている寝具に近いものが馴染みやすいのですが、柔らかすぎるマットレスを選べると、体を動かすににくいといった事も起こります。

ベッドとの適合

ベッドの寸法や機能に合わせて、必ず適合するマットレスを選びましょう。



このマークの付いた製品は、材料・工法などで地球環境に与える負荷を減らし、グリーン購入法に基づく特定調達物品の基準を満たしています。

対MRSA
抗菌加工

MRSAに対して優れた抗菌効果を発揮します。黄色ブドウ球菌、大腸菌などにも有効です。

抗菌・防カビ加工

バイオファーム加工。においの元になる細菌やカビの繁殖を阻止。

難燃加工

燃えにくいカバーを使用。

※抗菌効果は、菌の増殖を抑制するもので、殺菌ではありません。 ※抗菌剤による人体への影響はありません。

エバーリーフ7 マットレス(通気タイプ)

パラマウントベッド

安全性に配慮した薄型、寝心地が選べるリバーシブル構造



抗菌・防カビ加工

難燃加工

やや柔らかめ/ややかため

リバーシブル



安全性に配慮した薄型7cm
低床ベッドの安全性やサイドレールの高さを活かすことができます

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)	
D-003A	KE-541T	00170-000878	レギュラー (91cm幅)	長191×幅91×厚7
D-003B	KE-543T	00170-000880	レギュラー (83cm幅)	長191×幅83×厚7
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
2,000		200	400	600

プレグラー マットレス

パラマウントベッド

伸びて曲がるキューマラインボトムベッドに最適です。全体に柔軟性があり、良く曲がります。



抗菌・防カビ加工

難燃加工

かため



商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)	
D-201E	KE-557Q	00170-000444	レギュラー (100cm幅)	長191×幅99×厚8
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
2,000		200	400	600

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)	
D-201A	KE-551Q	00170-000159	レギュラー (91cm幅)	長191×幅91×厚8
D-201B	KE-553Q	00170-000142	レギュラー (83cm幅)	長191×幅83×厚8
D-201C	KE-5511Q	00170-000286	ミニ (91cm幅)	長180×幅91×厚8
D-201D	KE-5531Q	00170-000285	ミニ (83cm幅)	長180×幅83×厚8
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
2,000		200	400	600

特殊寝台
 特殊寝台付属品
 床ずれ防止用具
 体位変換器
 手すり
 車いす
 車いす付属品
 スロープ
 歩行器
 歩行補助杖
 認知症老人
 徘徊感知機器
 移動用リフト
 自動排泄処理装置

ストレッチスリム マットレス (通気タイプ) パラマウントベッド

マットレスが伸びて背あげに伴う身体のずれを軽減する
 ストレッチシステム採用。



ややかため

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)	
D-001A	KE-777TQ	00170-000749	レギュラー (100cm幅) 長191×幅99×厚7	
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
2,000		200	400	600

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)	
D-001B	KE-771TQ	00170-000745	レギュラー (91cm幅) 長191×幅91×厚7	
D-001C	KE-773TQ	00170-000747	レギュラー (83cm幅) 長191×幅83×厚7	
D-001D	KE-772TQ	00170-000746	ミニ (91cm幅) 長180×幅91×厚7	
D-001E	KE-774TQ	00170-000748	ミニ (83cm幅) 長180×幅83×厚7	
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
2,000		200	400	600

ストレッチフィット マットレス (通気タイプ) パラマウントベッド

ストレッチシステムにウレタンフォーム層を加え優れた体圧分散性を発揮。



柔らかめ

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)	
D-001F	KE-787TQ	00170-000739	レギュラー (100cm幅) 長191×幅99×厚9	
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
3,000		300	600	900

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)	
D-001G	KE-781TQ	00170-000735	レギュラー (91cm幅) 長191×幅91×厚9	
D-001H	KE-783TQ	00170-000737	レギュラー (83cm幅) 長191×幅83×厚9	
D-001I	KE-782TQ	00170-000736	ミニ (91cm幅) 長180×幅91×厚9	
D-001J	KE-784TQ	00170-000738	ミニ (83cm幅) 長180×幅83×厚9	
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
3,000		300	600	900

ソフィア (通気タイプ) モルテン

体圧分散性能と耐久性を両立した2つの寝心地を
 選べるリバーシブルマットレス



柔らかめ/ややかため
 リバーシブル

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)	
D-155E	MHAV10100A	00054-000315	レギュラー (100cm幅) 長191×幅100×厚10	
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
2,500		250	500	750


商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)	
D-155A	MHAV1091A	00054-000313	レギュラー (91cm幅) 長191×幅91×厚10	
D-155C	MHAV1083A	00054-000311	レギュラー (83cm幅) 長191×幅83×厚10	
D-155D	MHAV10915A	00054-000314	ミニ (91cm幅) 長180×幅91×厚10	
D-155B	MHAV10835A	00054-000312	ミニ (83cm幅) 長180×幅83×厚10	
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
2,000		200	400	600

テルサ (防水タイプ) モルテン

ご利用者さまとケア従事者さまのさまざまなニーズに対応し満足度を向上する
 “質感が選べる”標準マットレス



柔らかめ/ややかため
 リバーシブル

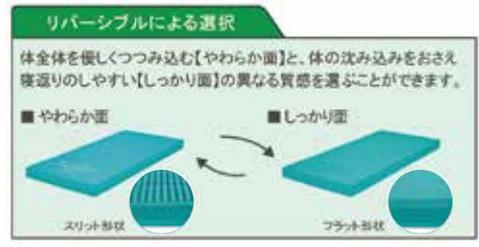

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
D-002A	MTLS1291	00054-000204	レギュラー (91cm幅) 長191×幅91×厚12
D-002B	MTLS1283	00054-000203	レギュラー (83cm幅) 長191×幅83×厚12

月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
2,500		250	500	750

Fit Tex フィットテックス(防水タイプ)

シーホネンス



柔らかめ

高反発ウレタン素材にスリット加工を施し、
ベッドの動きに合わせて体にフィットします。

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
D-164A	SA-1023L	00167-000192	長191×幅90×厚8
月極レンタル料金		1割負担	2割負担
2,000		200	400

エバーフィットC3 マットレス(清拭タイプ)

パラマウントベッド

厚さわずか10cmで体圧分散性能と動きやすさの
使い分けが可能なリバーシブルマットレス。



対MRSA
抗菌加工

難燃加工



柔らかめ/かため

リバーシブル

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
D-370E	KE-6175SQ	00170-001041	レギュラー (100cm幅) 長191×幅99×厚10
月極レンタル料金		1割負担	2割負担
2,500		250	500

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
D-370A	KE-6115SQ	00170-001037	レギュラー (91cm幅) 長191×幅91×厚10
D-370C	KE-6135SQ	00170-001039	レギュラー (83cm幅) 長191×幅83×厚10
D-370B	KE-6125SQ	00170-001038	ミニ (91cm幅) 長180×幅91×厚10
D-370D	KE-6145SQ	00170-001040	ミニ (83cm幅) 長180×幅83×厚10
月極レンタル料金		1割負担	2割負担
2,000		200	400

エバーフィットC3 マットレス(通気タイプ)

パラマウントベッド

厚さわずか10cmで体圧分散性能と動きやすさの
使い分けが可能なリバーシブルマットレス。



抗菌
防カビ加工

難燃加工



柔らかめ/かため

リバーシブル

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
D-371E	KE-6177TQ	00170-001046	レギュラー (100cm幅) 長191×幅99×厚10
月極レンタル料金		1割負担	2割負担
2,500		250	500

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
D-371A	KE-6117TQ	00170-001042	レギュラー (91cm幅) 長191×幅91×厚10
D-371C	KE-6137TQ	00170-001044	レギュラー (83cm幅) 長191×幅83×厚10
D-371B	KE-6127TQ	00170-001043	ミニ (91cm幅) 長180×幅91×厚10
D-371D	KE-6147TQ	00170-001045	ミニ (83cm幅) 長180×幅83×厚10
月極レンタル料金		1割負担	2割負担
2,000		200	400

シングルウェーブ マットレス

シーホネンス

ベッドのボトムの動きに合わせて自然に曲がるように
縦方向のウェーブを特殊製法によりマットレス全面に
施しています。



かため

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
D-191A	MB-6003L	00167-000309	長191×幅90×厚6
月極レンタル料金		1割負担	2割負担
1,000		100	200