

床ずれ防止用具

床ずれとは

非常に治りにくい皮膚の潰瘍で、発熱の原因になったりすることもあります。


1 床ずれはどうしてできるのか？

- ① いつも下になっている部分の皮膚が圧迫されるので血行が悪くなる
- ② 皮膚が不潔になったり、湿ったり、摩擦が起きたりする
- ③ 全身の栄養状態が悪くなる


何より大切なことは、
床ずれを
つくらないことです！

2 床ずれのできやすい場所

● 仰向けに寝ている場合

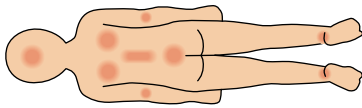

● 横向けに寝ている場合

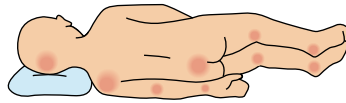


● 体圧のかかりやすい、骨の突き出た所に注意してください。(例) 仙骨部、足、足関節部、大転子部、等

床ずれ防止の三原則


原因となる要素を取り除く必要があります。

1 体位交換をして、同じ部位の圧迫をさける

- 仰向け、右向き、左向き、……と、2時間毎に体位を変える

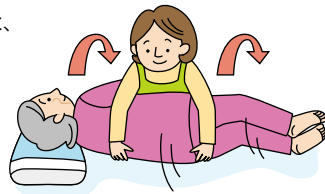

- できるだけ座る姿勢をとる

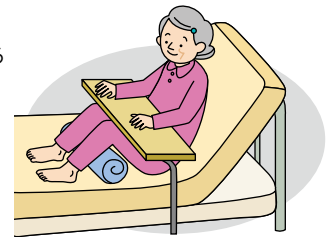

2 清潔を保ち、刺激をさける

- ① 入浴や清拭で皮膚を清潔にし、こまめにおむつ交換をして、むれを少なくする
- ② 寝まき、シーツはノリづけせず、よく乾いたものをシワのないように
- ③ 寝まき、シーツ、ふとんはよく日光に干す
- ④ 寝床にゴミや食べかすなどがあれば取り除く



3 全身の栄養状態を良くする

食べやすく工夫した、バランスの良い食事内容にする。特に、たん白質やビタミンCを十分に摂るようにしましょう。




※すべての人が防止できるわけではありませんが、適切な対応をとりましょう。

床ずれ防止用具の種類

ご利用者さまの身体状況に応じて、適切な床ずれ防止用具を選びましょう。


エアーマットタイプ

ポンプから出るエア（空気）によって、複数のエアセルを膨張・収納させて、体を支える面を変化させます。

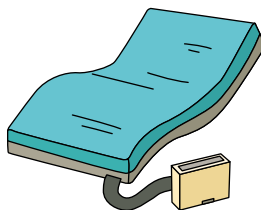

静止型マットレスタイプ

ウレタンフォーム、ジェル等の素材により、広い面で体を支えることにより、体圧を分散させます。

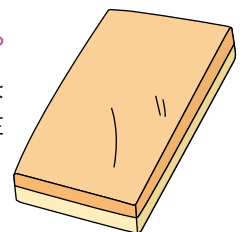

マットレスの種類と選び方

床ずれ発生リスク度の判定方法 (OHスケール)

評価法	自立体位変換	完全に「できる」、完全に「できない」以外は「どちらでもない」	できる 0点 どちらでもない 1.5点 できない 3点
	病的骨突出(仙骨部)	中央から8cm離れたところの高低差によって評価	なし 0点 軽度・中重度 1.5点 高度 3点
	浮腫(むくみ)	指で5秒間押し、指を離してもへこみが消えなければ浮腫あり	なし 0点 あり 3点
	関節拘縮	関節拘縮のあるなしで評価	なし 0点 あり 1点

床ずれ発生リスク度の判定結果 (合計点数)

	リスク無し(0点)	軽度(1~3点)	中等度(4~6点)	高度(7~10点)
静止型マットレス		ビリーブ p35		
		キューオラ p35		
		アクアフロート p35		
		ストレッチグライド p36		
		アルファブラフII-W p36		
		ディンプルマットレス p36		
		エバープラウド p37		
		ナーセント コンタ p37		
エアマットレス			ここちあ利楽フロー p32	
			ここちあ利楽 p32	
			ここちあ 結起 3D p32	
			ネクサスR p33	
			ラゲーナ p33	
			マイクロクライメイト ビッグセル アイズ p33	
			ステージア p34	
			アマンダ p34	
		オスカー p34		

こちあ利楽フロー

パラマウントベッド

自動体位変換機能「スモールフロー機能」を搭載。
全自動運転エアマットレス「こちあ利楽」が
グレードアップ。

対MRSA
抗菌加工

難燃加工



圧切替型／高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-396G	KE-911S	00170-001351	レギュラー (91cm幅) 全長191×全幅91×厚17
E-396H	KE-913S	00170-001353	レギュラー (83cm幅) 全長191×全幅83×厚17

- 小さな体位変換を繰り返す『スモールフロー機能』を搭載
- 独自の『i-fitting機能』で体重・体形から背あげや難床に自動対応
- 寝位置センサーによる制御で、自動運転中のずれ・転落を予防
- 厚さ17cmの独自構造で、優れた体圧分散性を発揮
- 約10分で空気を充填できる大容量ビルトインポンプを搭載
- 清拭消毒に対応する耐薬品性・防水性カバー

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
9,000	900	1,800	2,700


こちあ利楽

パラマウントベッド

体重・体形を検知して、かたさを常時自動設定。
操作不要、全自動で使えるエアマットレスです。

対MRSA
抗菌加工

難燃加工

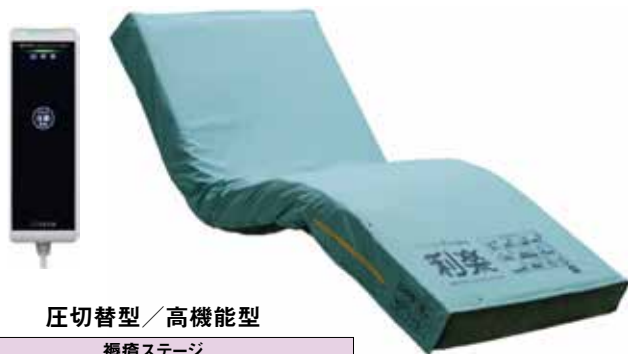

圧切替型／高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-396E	KE-971S	00170-001065	レギュラー (91cm幅) 全長191×全幅91×厚13
E-396F	KE-973S	00170-001067	レギュラー (83cm幅) 全長191×全幅83×厚13

- 全自動で使えるi-fitting(かたさ自動運転機能)を搭載
- 背あげ時にかかるずれ力を軽減するグライドシート付き
- エアセルをユニット化した構造で安定した寝心地を実現
- 約10分で空気を充填できる大容量ターボポンプを搭載
- ポンプが邪魔にならないビルトインポンプ
- 清拭消毒に対応する耐薬品性・防水性カバー

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
7,000	700	1,400	2,100

こちあ 結起 3D

パラマウントベッド

「体圧分散」と「ずれ軽減」で床ずれリスクを
軽減する、全く新しいベッド連動型エアマットレス。



◆ベッドリンク機能

ベッドの背あげ操作に連動して
マットレスの圧切替や背ぬき、
姿勢保持などを行うためエアの
圧力をフルオートで制御し、背
あげの際の床ずれリスクを軽減
します。楽匠Sベッド及び楽匠Z
ベッドとのリンクが可能です。

圧切替型／高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-396C	KE-931QS	00170-000845	レギュラー (91cm幅) 全長191×全幅91×厚15
E-396D	KE-933QS	00170-000847	レギュラー (83cm幅) 全長191×全幅83×厚15



フルカラー液晶
操作パネル

cococia ゆうき

結起

3Dタイプ
PARAMOUNT BED

対MRSA
抗菌加工

難燃加工

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
9,000	900	1,800	2,700

マイクロライメイト ビッグセル アイス

ケーブル



エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロライメイト対応のファンモーターがエアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気。



圧切替型 / 高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-407A	CR-753	00206-000141	レギュラー (91cm幅) 全長192×幅90×厚15
E-407B	CR-750	00206-000140	レギュラー (83cm幅) 全長192×幅84×厚15

角度・時間管理アシスト機能

背上げの角度表示は、セミファウラー位の15°から5°刻みで液晶画面に表示。背上げの経過時間も表示されるので、経管栄養等のケアの時間管理にも使えます。

背上げ角度をセンシング

マットレスに内蔵されたセンサが背上げの角度を検知し、角度に応じた適切な内圧に自動調整。どの角度でも、定期的な圧切替で床ずれを防止します。

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
10,000	1,000	2,000	3,000

エアマスター ネクサスR

ケーブル



ワンタッチで誰でも簡単に安全に使用出来る高機能エアマットレス。



- かんたんモード搭載で40kg~60kgの療養者は電源コンセントを入れるだけ。
- 体重設定は20kg~120kgに対応。



商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-394D	CR-663	00206-000083	レギュラー (91cm幅) 全長191×幅90×厚12
E-394E	CR-660	00206-000082	レギュラー (83cm幅) 全長191×幅84×厚12
E-394F	CR-667	00206-000085	ミニ (91cm幅) 全長180×幅90×厚12
E-394G	CR-665	00206-000084	ミニ (83cm幅) 全長180×幅84×厚12

圧切替型 / 高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
8,000	800	1,600	2,400

スモールチェンジ ラグーナ (体位変換器)

ケーブル

15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す、「スモールチェンジ機能」搭載。快適な眠りを実現し、介護者の負担を軽減します。

かんたん設定 マットレスのやわらかさを自動調整



圧切替型 / 高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期



眠つき防止 エアセルが体重をしっかりと支え、眠つきのリスクを防ぎます。

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
F-374A	CR-703	00206-000103	レギュラー (91cm幅) 全長192×全幅90×厚13.5
F-374B	CR-700	00206-000102	レギュラー (83cm幅) 全長192×全幅84×厚13.5


月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
9,000	900	1,800	2,700

ステージア モルテン



圧切替型／高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

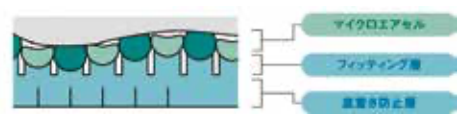

体圧分散式マットレスに求められる基本特性(体圧分散性能、除圧性能、寝心地のよさ)を向上し、エアマットレスの弱点(端座位の安定感と立ちあがりやすさ、むれ&ひえ)を対策した、床ずれケアのための高機能エアマットレス。

体圧分散式マットレスに求められる8つの特性を備えています。


体圧分散性能	除圧性能	寝心地	座位安定性
むれ対策	ひえ対策	ずれ力対策	安全衛生対策

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-397A	MSTA91	00054-000115	レギュラー(91cm幅) 全長193×全幅91×厚13
E-397B	MSTA83	00054-000115	レギュラー(83cm幅) 全長193×全幅83×厚13
E-397C	MSTA91S	00054-000115	ミニ(91cm幅) 全長182×全幅91×厚13
E-397D	MSTA83S	00054-000115	ミニ(83cm幅) 全長182×全幅83×厚13

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
7,000	700	1,400	2,100

アマンド モルテン

「3D除圧」と「お知らせ機能」を搭載し安全・安心を追求した高機能エアマットレス。

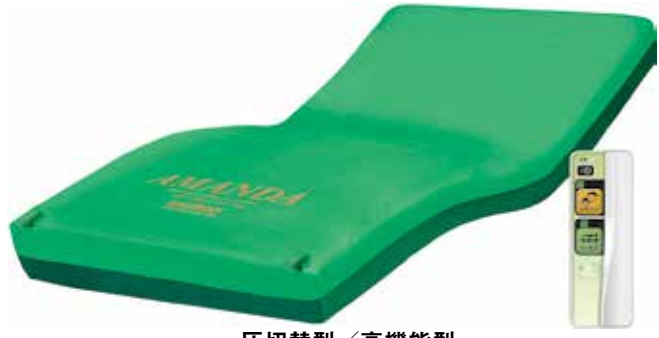

圧切替型／高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

●究極の床ずれ対策を実現した「3D除圧」

独自構造のエアセルは寝心地を損なわず、全方向(縦、横、傾き方向)から除圧を行いながら、利用者様の身体を優しく傾けます。

たて除圧	よこ除圧	傾き除圧
------	------	------

●ベッドまわりの安全・安心を追求した「お知らせ機能」

マットレスにセンサーを内蔵し、起き上がりやずり落ちの可能性を検知するとお知らせします。



●シンプルなりモコン操作

かんたんなりモコン操作でお知らせの通知やマットレスのかたさ、除圧動作などを変更することができます。

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-405A	MAMA91	00054-000436	レギュラー(91cm幅) 全長193×全幅91×厚14
E-405B	MAMA83	00054-000435	レギュラー(83cm幅) 全長193×全幅83×厚14


月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
9,000	900	1,800	2,700

オスカー モルテン



圧切替型／高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

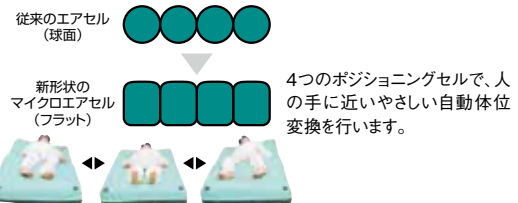

さまざまな身体状況のご利用者さまへのケアに最適な特性で対応する、人の手でを行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス。

体圧分散式マットレスに求められる9つの特性を備えています。

体圧分散性能	除圧性能	ずれ力対策	寝心地	安全衛生対策
座位安定性	むれ対策	ひえ対策	体位変換	

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-398A	MOSC91	00054-000137	レギュラー(91cm幅) 全長193×全幅91×厚17
E-398B	MOSC83	00054-000137	レギュラー(83cm幅) 全長193×全幅83×厚17
E-398C	MOSC91S	00054-000137	ミニ(91cm幅) 全長182×全幅91×厚17
E-398D	MOSC83S	00054-000137	ミニ(83cm幅) 全長182×全幅83×厚17

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
9,000	900	1,800	2,700

ビリーブ

モルテン

寝返りの頻度を感知し、最適な圧対策に導く自動フィットングマットレス。



利用者様の寝返りの頻度を判定し、床ずれ防止で最も重要な圧対策を自動運転でおこないます。

操作ボタンなし、電源を入れたら後はビリーブにおまかせください!

状態 A

自力で離床できる人


- ・寝返りできる
- ・寝心地(マットレスのかたさ)に敏感
- ・適度な体圧分散性が好まれる



状態 B

介助があれば離床できる人

- ・寝返りはなんとかできるが回数が少ない
- ・局所にかかる圧を自らは逃がしにくい
- ・床ずれ防止=高い体圧分散性が必要

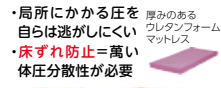

状態 C

寝たきりの人

- ・寝返りできない
- ・圧がずっとかかり続けるため
- ・床ずれ防止=高い体圧分散性+除圧が必要



褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)		
E-409A	MBLV91G	00054-000567	レギュラー 全長193×全幅91×厚13 (91cm幅)		
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担	
7,000		700	1,400	2,100	

自動圧抜き機能

マットレスを背上げすると、自動的に「圧抜き」動作をおこない、さまざまな部位にかかる苦しさを緩和します。



端座位・ケア時の安定性

マットレスの下部および両サイドに安定支持フォームを配置することで安定性を高めています。



安全で衛生的な環境のために

完全防水のカバーとインナー保護フィルムにより、嘔吐、吐血、失禁、薬剤などの汚れがマットレス内部に浸透するのを防ぎます。

表面に付着した汚れはアルコールなどで簡単に「清拭消毒」が可能です。



キュオラ(通気タイプ)

ケーブ



抜群の通気性、動きやすい安定性、優れた体圧分散性、ご利用者さまのQOLを高めるウレタンフォームマットレスです。

Ag+
銀抗菌

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)	
E-383D	CR-591	00206-000077	レギュラー (91cm幅) 全長191×全幅90×厚10	
E-383E	CR-590	00206-000077	レギュラー (83cm幅) 全長191×全幅83×厚10	

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500

アクアフロート(通気タイプ)

パラマウントベッド



中央部に埋め込まれた水溶液のパックが、床ずれ発生リスクの高い臀部の圧力を効果的に分散させます。背上げた時に、特に高い効果を発揮します。

褥瘡ステージ

なし	第1期	第2期	第3期	第4期
----	-----	-----	-----	-----



難燃加工

抗菌・防カビ

数量限定商品の為、お問い合わせください。

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)	
E-373A	KE-841Q	00170-000507	レギュラー (91cm幅) 全長191×全幅91×厚12	
E-373B	KE-843Q	00170-000508	レギュラー (83cm幅) 全長191×全幅83×厚12	

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500

特殊寝台
 特殊寝台付属品
 床ずれ防止用具
 体位変換器
 手すり
 車いす
 車いす付属品
 スロープ
 歩行器
 歩行補助杖
 認知症老人
 徘徊感知機器
 移動用リフト
 自動排泄処理装置

ストレッチグライドマットレス (通気タイプ)

パラマウントベッド

ストレッチシステムにウレタンフォームを2層プラス。
 最高クラスの体圧分散性能を発揮します。



難燃加工

抗菌・防カビ



商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-373E	KE-797TQ	00170-000729	レギュラー (100cm幅) 全長191×全幅99×厚12.5
月極レンタル料金		1割負担	2割負担
6,000		600	1,200

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-373F	KE-791TQ	00170-000725	レギュラー (91cm幅) 全長191×全幅91×厚12.5
E-373G	KE-793TQ	00170-000727	レギュラー (83cm幅) 全長191×全幅83×厚12.5
E-373H	KE-792TQ	00170-000726	ミニ (91cm幅) 全長180×全幅91×厚12.5
E-373I	KE-794TQ	00170-000728	ミニ (83cm幅) 全長180×全幅83×厚12.5
月極レンタル料金		1割負担	2割負担
5,000		500	1,000


アルファプラFII-W (通気タイプ)

タイカ

「抗菌」+「抗ウイルス」のW加工カバーを使用。
 寝返りがしやすい特殊構造に端座位の安定性と体圧分散性能を両立。

抗菌

抗ウイルス

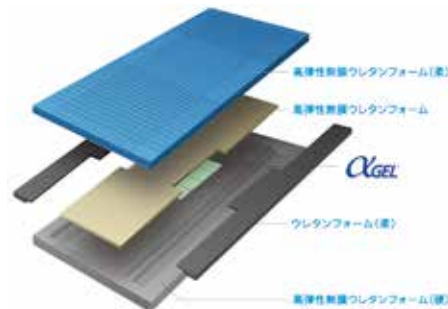

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-377F	MB-FIIPA1R	00563-000145	レギュラー (91cm幅) 全長195×幅91×厚13
E-377G	MB-FIIPA3R	00563-000143	レギュラー (83cm幅) 全長195×幅83×厚13
月極レンタル料金		1割負担	2割負担
7,000		700	1,400

ディンプルマットレス (防水タイプ)

ケーブ

内部にディンプル形状(くぼみ)の空間を持たせ、
 ウレタンフォーム特有の反力を軽減し、
 優れた体圧分散性と快適な寝心地を両立させたマットレスです。

Ag+
銀制菌

防炎加工



褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-376A	CR-541	00206-000070	レギュラー (91cm幅) 全長191×全幅90×厚12
E-376B	CR-540	00206-000070	レギュラー (83cm幅) 全長191×全幅83×厚12
E-376C	CR-543	00206-000070	ミニ (91cm幅) 全長180×全幅90×厚12
E-376D	CR-542	00206-000070	ミニ (83cm幅) 全長180×全幅83×厚12
月極レンタル料金		1割負担	2割負担
4,000		400	800

エバープラウド

パラマウントベッド

エクストラソフト面とソフト面のリバーシブルで「体圧分散・ずれ軽減・蒸れ軽減」の3つの機能で床ずれ防止をサポート。少しでも寝返りが出来る人にオススメ。


通気タイプ

対MRSA抗菌加工 (ドライタイプ) 抗菌・防カビ (通気タイプ) 軽熱加工

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-402A	KE-621TQ	00170-000962	レギュラー (91cm幅) 全長191×全幅91×厚13
E-402C	KE-623TQ	00170-000964	レギュラー (83cm幅) 全長191×全幅83×厚13
E-402B	KE-622TQ	00170-000963	ミニ (91cm幅) 全長180×全幅91×厚13
E-402D	KE-624TQ	00170-000965	ミニ (83cm幅) 全長180×全幅83×厚13

ドライタイプ

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-403A	KE-621UQ	00170-000966	レギュラー (91cm幅) 全長191×全幅91×厚13
E-403C	KE-623UQ	00170-000968	レギュラー (83cm幅) 全長191×全幅83×厚13
E-403B	KE-622UQ	00170-000967	ミニ (91cm幅) 全長180×全幅91×厚13
E-403D	KE-624UQ	00170-000969	ミニ (83cm幅) 全長180×全幅83×厚13

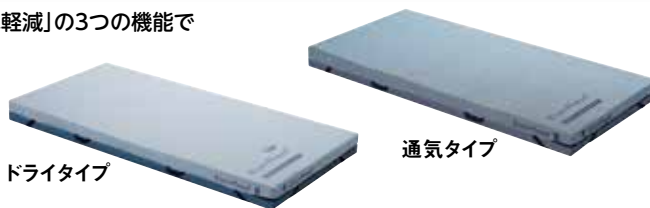

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500

- 優れた体圧分散性を実現するウレタンフォーム
- サイドエッジで端座位が安定
- 5層構造

ナーセントコンタ(通気タイプ)

アイソネックス

新発想の3Dフォームで体圧分散と姿勢保持を両立。身体形状に沿わせて支える3D層とウレタンフォームの特殊カット技術を追求することで、リラックスした理想的な寝姿勢を実現。




褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-406C	NCMA-91	00149-000063	レギュラー (91cm幅) 全長190×全幅91×厚11~15
E-406D	NCMA-83	00149-000062	レギュラー (83cm幅) 全長190×全幅83×厚11~15

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,000	600	1,200	1,800

ベッド背上げ時の滑りすわりや横倒れを防止

ベッドで食事や胃ろう注注入を行うとき、各サポートの動きで、滑りすわりによる腹部圧迫や横倒れしにくい快適な背上げ姿勢にします。

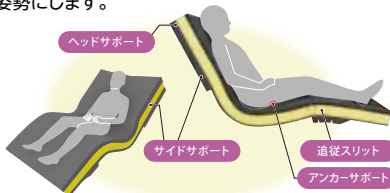


- ヘッドサポート
 - 背上げしたとき、頸を軽く引いた姿勢になるので咀嚼や飲み込みが楽になります。
 - 仰臥位で就寝するときも、頸が上がりにくいので開口しにくい姿勢になります。
- アンカーサポート
 - 背上げしたとき、アンカーサポートで座骨の滑り出しがストップし、大腿部が支えられるので、腹部圧迫や、踵のずれ・圧迫を軽減できます。
- サイドサポート
 - 両サイドが盛り上がっているので、背上げしたときの横倒れを防止します。
 - 側臥位するとき、頭や上肢がずり落ちたり、サイドレールとの間に挟み込まれるリスクを軽減します。
- 追従スリット
 - 膝上げしたとき、マットレスがベッドの動きに追従しやすくなります。

ポジショニングの手間とクッション数を最小限に

3D層がポジショニングクッションと同じ役割を果たすので、少ないクッションで体位変換やポジショニングができます。

- 側臥位が崩れにくい
 - 両サイドが盛り上がっているので、姿勢が安定します。
- シンプルなポジショニングが可能
 - 看護・介護の統一的なケアの推進に役立ちます。

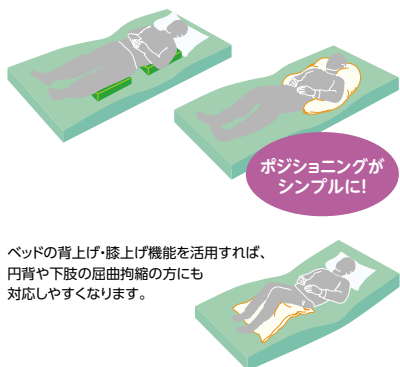


ベッドの背上げ・膝上げ機能を活用すれば、円背や下肢の屈曲拘縮の方にも対応しやすくなります。

「ねすわりガイド」で座る・寝る位置がハッキリ!

寝る位置や車いすからベッドに移乗する位置をわかりやすくガイド。マットレスの機能を最大限に発揮するための目安です。(ホック式で左右入替可能)



- 移乗して座るポイント
 - ねすわりガイドを目安にするとフラットエリアに安定して座ることができます。

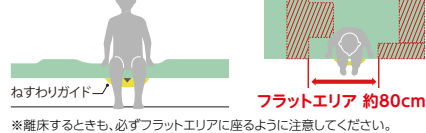

※離床するときも、必ずフラットエリアに座るように注意してください。

- ベッドに寝るポイント
 - 股関節(大転子)⇄上前腸骨棘の間に、ねすわりガイドの▽マークが入るようにすると、最適な姿勢で寝ることができます。



▽は大転子、上前腸骨棘の間に入るように

ブレイラプラス

グローバル産業

マットレスの上にひくだけで床ずれ予防効果を得られる通気性のよい夏は涼しく、冬は暖かいベッドパッドです。



商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
E-401A	BRPS-910R	01149-000012	レギュラー (91cm幅) 全長195×全幅91×厚1.5

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
1,800	180	360	540